

Manuelle Reinigung und Wartung des DASK oder SDK KIT

Sterilisations- und Instrumentenpflegeverfahren

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen sowie Hygienerichtlinien zur Vermeidung von Kontaminationen und Infektionen.

- Bitte beachten Sie, dass Sie für die Wartung und Sterilität Ihrer medizinischen / zahnmedizinischen Produkte / Geräte verantwortlich sind.
- Es ist wichtig, richtige Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren anzuwenden und zu befolgen.
- Es ist auch wichtig, die Herstellerempfehlung für den Einsatz von Bohrern zu befolgen.
- Bitte protokollieren Sie, wie oft die Bohrer verwendet wurden.
- Die Nutzung des Bohrers wird durch die Operationsstelle und nicht pro Patient bestimmt. Die Knochendichte und Nutzung bestimmt die Lebensdauer der Bohrer.
- Bohrer sollten nach etwa 15-20 Anwendungen auf der Grundlage der Knochendichte als Ersatz betrachtet werden. Überprüfen Sie die Bohrer auf Verschleiß.

Hinweise:

Neue unsteril gelieferte Instrumente müssen vor Erstgebrauch aufbereitet werden.

Instrumente aus Werkzeugstahl sind ohne entsprechende Vorbehandlung nicht für die Sterilisation geeignet (beachten Sie hierzu unsere gesonderten Wiederaufbereitungshinweise für Stahlinstrumente). Achten Sie zudem darauf, dass Instrumente aus unterschiedlichen Materialien niemals zusammen wiederaufbereitet werden sollten.

Reinigung/ Desinfektion:

Einlegen im Reinigungsbad für vorgegebene Reinigungszeit und Konzentration (die Angaben vom Hersteller des Reinigungsmittels müssen unbedingt eingehalten werden). Produkte dürfen sich dabei nicht berühren.

Lumen: 5x zu Beginn und zum Ende der Einwirkzeit mit Einmalspritze und Kanüle spülen.

Produkte entnehmen und mind. 3x gründlich spülen. Produkte kontrollieren.

Produkte für vorgegebene Einwirkzeit ins Desinfektionsbad einlegen (die Angaben vom Hersteller des Desinfektionsmittels müssen unbedingt eingehalten werden). Produkte dürfen sich nicht berühren.

Lumen: 5x zu Beginn und zum Ende der Einwirkzeit mit Einmalspritze und Kanüle spülen.

Produkte entnehmen und 3 x mit Wasser spülen. Produkte durch Ab-/Ausblasen mit Druckluft trocknen.

Produkte verpacken.

Zum Trocknen gefilterte Luft einsetzen, zum Nachspülen nur steriles oder keimarmes sowie endotoxinarmes Wasser einsetzen.

1. Alle Instrumente müssen unmittelbar nach dem Gebrauch einige Minuten in einem keimtötenden Bad vorgeweicht werden, um zu verhindern, dass sich Fremdkörper an den Instrumenten festsetzen. Nicht über Nacht einweichen.
2. Reinigen Sie mit einer weichen Bürste, um die Verschmutzungen zu entfernen.
3. Verwenden Sie für interne Spülbohrer eine Reibahle oder eine kleine Messnadel, um die Bohrer intern zu reinigen.
4. Bevor Sie einen Ultraschallreiniger benutzen, wickeln Sie die Bohrer in eine 2 x 2 Gaze, um ein einander Reiben zu verhindern.
5. Spülen Sie gründlich mit warmem Wasser, intern mit Hilfe einer Spritze und einer feinen stumpfen Kanüle.
6. Reinigen Sie alle Instrumentenschalen vor dem Austausch der Instrumente im Kit mit einem keimtötenden Reinigungsmittel.
7. Trocknen Sie alles vollständig und legen Sie es zurück in das Kit.
8. Nach dem Spülen und Trocknen immer auf Beschädigungen oder Korrosion prüfen.
9. Verschließen Sie das Kit in einem Sterilisationsbeutel.

Kontrolle/ Wartung/ Verpackung:

Sichtprüfung auf Korrosion, beschädigte Oberflächen / blanke Stellen, stumpfe oder ausgebrochene Schneiden / Absplinterungen, Formschäden und Verschmutzungen und beschädigte Produkte aussondern.

Noch verschmutzte Produkte erneut reinigen.

Zerlegte Produkte wieder zusammensetzen, dabei keine Instrumentenöle einsetzen.

Gereinigte und desinfizierte Produkte in den zugehörigen Bohrerständer / das zugehörige Sterilisationstray einsortieren und Produkte bzw. Ständer in Einmalsterilisationsverpackungen verpacken.

Sterilisation/ Dampfsterilisation

Mit einem Dampfautoklaven in 121°C / 250F für 30 Minuten sterilisieren oder die Empfehlungen des Herstellers beachten.

Lagerung:

Trocken und staubfrei in der Sterilisationsverpackung lagern, dabei die Haltbarkeit beachten.



Demedi-Dent GmbH & Co. KG
Brambauerstr. 295; 44536 Lünen
Tel: 0231 427 84 74 / Fax: 0231 427 84 75
E-Mail: info@demedi-dent.com
URL: www.demedi-dent.com